





















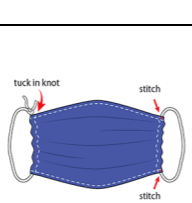







Equipo	Tipo	Foto	Protección del personal que la lleva contra organismos infecciosos presentes en aerosoles	Barrera para no contagiar / evita emisión de organismos infecciosos al ambiente	Observaciones
Mascarillas auto filtrantes desechables EPIS. (Norma EN 149). (Reutilizables solo las marcadas con "R" (solo algunos modelos de FFP2 y FFP3). Modelos "NR" (no reutilizable) de uso para un solo turno (8 h).  Diseñadas para trabajar de fuera hacia dentro. FFP1: 78% filtración mínima 22% fuga hacia interior máxima. FFP2: 92% filtración mínima 8% fuga hacia interior máxima FFP3: 98% filtración mínima 2% fuga hacia interior máxima. ^b	FFP1 sin válvula de exhalación ^a			 sin certificación EN 14683	Es un equipo de protección, pero su eficacia de filtración mínima (78%) no garantiza protección suficiente frente a organismos infecciosos. Limita la propagación del contagio (sin certificación EN 14683)
	FFP2 y FFP3 sin válvula de exhalación ^a			 sin certificación EN 14683	Protege y limita (sin certificación EN 14683) la propagación del contagio. Mascarillas no Europeas (se debe solicitar su certificado, y deben ir marcadas) aceptadas temporalmente para su uso en España: NIOSH USA: Equivalencia a FFP2: Certificaciones N95, R95, P95. Equivalencia a FFP3: Certificaciones N99/N100, R99/R100, P99/P100. China, KN95, equivalencia a FFP2: certificación KB2662.
	FFP1, FFP2 y FFP3 con válvula de exhalación ^a				Protege (excepto FFP1) pero no limita completamente la propagación del contagio al disponer de válvula de exhalación ^a (la válvula dispone de un sistema mecánico, de apertura libre al exhalar)
Mascarilla dual / bidireccional desechable. EPI (Norma EN 149) Y Producto Sanitario (PS, BARRERA, Norma EN 14683). ^b	EN149: FFP1/FFP2/FFP3 EN14683: IIR				Protege (FFP2 y FFP3) y limita la propagación del contagio. Puede llevar válvula de exhalación cubierta o "tapada". Certificación EN149 y EN 14683. (Equivalente a Surgical N95 Niosh USA)
Mascarilla quirúrgica, desechable. NO EPI, SÍ PS (barrera, Norma EN 14683). Trabaja de dentro hacia fuera. Eficacia filtración bacteriana (EFB): tipo I >95%, tipo II y IIR >98%. Tipo IIR resistente a salpicaduras	I, II, y IIR				No es un equipo de protección. No protege, pero limita la propagación del contagio. El tipo I sólo debe ser utilizado por pacientes, no por personal médico. Su utilización por la ciudadanía debe entenderse como una medida complementaria y el portador debe seguir utilizando las medidas de distanciamiento social y rigurosa higiene.
Mascarillas higiénicas NO EPI NI PS sujeta a normas: UNE 0064-1 (adultos)/2 (niños), desechables. EFB >95% (según criterios EN 14683). UNE 0065, reutilizables. EFB >90%. Trabajan de dentro hacia fuera.	UNE 0064-1 (adultos) y 2 (niños), desechables. UNE 0065 (adultos y niños (reutilizables))				No es un equipo de protección. No protege, pero limita la propagación del contagio. Certificación EN 0064-1 y 2: desechable, 4 horas de uso máximo continuado. UNE 0065: reutilizable, 4 h. uso máximo continuado, nº lavados a determinar por fabricante (mínimo 5), con detergente y agua a 60º, con secado mínimo de 2 h) MODELOS MÁS INDICADOS PARA LA CIUDADANÍA GENERAL. Su utilización por la ciudadanía debe entenderse como una medida complementaria y el portador debe seguir utilizando las medidas de distanciamiento social y rigurosa higiene.
Mascarillas higiénicas NO EPI NI PS desechable (mascarilla sin marcado CE, ni sujeta a norma).	N.A.				No es un equipo de protección. No protege, pero podría limitar la propagación del contagio. No sujeto a norma, eficacia no testada. De un solo uso. Su utilización, de forma inadecuada, podría incrementar el riesgo y obliga a extremar las medidas de distanciamiento social y rigurosa higiene.
Mascarillas de fabricación caseras o artesanales (mascarilla sin marcado CE, ni sujeta a norma).	N.A.				No es un equipo de protección. No protege y tampoco asegura limitar la propagación del contagio, que siempre dependerá de los materiales utilizados para su confección, y del ajuste facial. Lavar frecuentemente con agua a 60º y detergente. No sujeto a norma, eficacia no testada. Su utilización, de forma inadecuada, podría incrementar el riesgo y obliga a extremar las medidas de distanciamiento social. y rigurosa higiene.
Semimáscara con filtros integrados (EN 405) / semimáscara buconasal (EN140) y máscara completa (EN136) con filtros (EN143). Trabajan de fuera hacia dentro. ^b	Diferentes modelos				Todas disponen de válvula de exhalación. Protegen (excepto con filtro P1) pero no limita completamente la propagación del contagio, al disponer de válvula de exhalación ^a

Notas: ^a La válvula de exhalación, excepto que sea una válvula cubierta o "tapada", permite que el aire sea exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del agente. Por lo tanto, no se puede garantizar la total limitación de la propagación del contagio. La ciudadanía no debe utilizar mascarillas que incorporen válvulas de exhalación, pero todos deberían usar una de barrera.

^b Las mascarillas EPI (con sombreado naranja), deberían ser usadas exclusivamente por el personal de mayor exposición. Su utilización requiere formación adecuada, test de ajustes y deberían utilizarse únicamente bajo las directrices y recomendaciones de un Técnico en Prevención - Servicio de Prevención. Mascarillas NO EPI de barrera, certificadas, sombreado verde. Mascarillas NO EPI de barrera, no certificadas, sin sombreado.

En todos los casos, la utilización de mascarillas, requiere el conocimiento adecuado de su uso y limitaciones. Como norma general se deben poner y quitar extremando la higiene de las manos y evitando en todo momento tocar la mascarilla con las manos durante su utilización, ni colocarla en la frente o barbilla como descanso. Lea de forma detenida las instrucciones de uso e infórmese sobre su correcta utilización. No está recomendado desinfectar las mascarillas de un solo uso para su reutilización. **Autor: Pablo Medina Sánchez. Técnico Superior Prevención de Riesgos Laborales. pablo.medina@bureauveritas.com**